

HBs 抗体		2245000			
		担当部署			
HBsAb 定量		生化			
<b>検査オーダー</b>					
患者同意に関する要求事項		特記事項なし			
オーダー手順	1	電子カルテ→指示①→検査→*1.頻用→			
	2	電子カルテ→指示①→検査→*2.分野別→感染症・ウイルス→			
	3				
	4				
	5				
検査に影響する臨床情報		特記事項なし			
検査受付時間		8 : 15 ~ 16 : 00			
<b>検体採取・搬送・保存</b>					
患者の事前準備事項		特記事項なし			
検体採取の特別なタイミング		特記事項なし			
検体の種類	採取管名	内容物	採取量	単位	
1	全血	10 青	分離剤	8	mL
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
検体搬送条件		室温			
検体受入不可基準		1)採取容器違いの検体 2)バーコードラベルの貼られていない検体 3)固形物 4)粘性のある検体			
保管検体の保存期間		冷蔵・2 週間(追加検査については、検査室に要問合せ)			
<b>検査結果・報告</b>					

検査室の所在地		病院棟 3 階 中央検査部				
測定時間		当日中～翌日				
生物学的基準範囲		設定なし				
臨床判断値		陰性：測定値が 1 0 m I U / m L 未満を示す検体は陰性とする。 陽性：測定値が 1 0 m I U / m L 以上を示す検体は陽性とする。 ルミパルス HBsA b 添付文書				
基準値					単位	mIU/mL
共通低値	共通高値	男性低値	男性高値	女性低値	女性高値	
0	9.9	設定なし	設定なし	設定なし	設定なし	
パニック値	高値	設定なし				
	低値	設定なし				
生理的変動要因		特記事項なし				
臨床的意義		血清又は血漿中の抗 HBs 抗体(HBV 表面抗体)の検出又は測定( B 型肝炎ウイルス感染の診断補助、B 型肝炎ウイルスワクチン投与の判定及び治療効果のモニタリング) 抗 HBs 抗体は、HBs 抗原に対する抗体で、過去の B 型肝炎ウイルス感染を示す他、B 型肝炎ワクチン接種者にも認められます。B 型肝炎ウイルスに対する中和抗体として働き、感染防御能を持ちます。 ルミパルス HBsAb 添付文書				