

SARS Cov-2 抗原定量					2432000
SARS Cov-2 Q					担当部署
					生化
検査オーダー					
患者同意に関する要求事項		特記事項なし			
オーダー手順	1	電子カルテ→指示①→検査→*16.コロナ関連→			
	2				
	3				
	4				
	5				
検査に影響する臨床情報		特記事項なし			
検査受付時間		8 : 15~16 : 00(平日) 8 : 15~12 : 00(休日)			
検体採取・搬送・保存					
患者の事前準備事項		特記事項なし			
検体採取の特別なタイミング		特記事項なし			
検体の種類	採取管名	内容物	採取量	単位	
1	鼻咽頭拭い液	COVID PCR	PBS	1	本
2	鼻咽頭拭い液	COVID PCR	生理食塩水	1	本
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
検体搬送条件		室温			
検体受入不可基準		1)採取容器違いの検体 2)バーコードラベルの貼られていない検体 3)綿棒および生理食塩水のはいつていない検体			
保管検体の保存期間		当日 : 2-8℃ -80℃3 日間			
検査結果・報告					

検査室の所在地	病院棟 3 階 中央検査部					
測定時間	当日中～翌日					
生物学的基準範囲	設定なし					
臨床判断値	陰性： 1.0 pg/mL 未満 陽性： 1.0 pg/mL 以上 AIA-パック CL SARS-COV-2-Ag 添付文書					
基準値					単位	pg/mL
共通低値	共通高値	男性低値	男性高値	女性低値	女性高値	
0	0.9	設定なし	設定なし	設定なし	設定なし	
パニック値	高値	設定なし				
	低値	設定なし				
生理的変動要因	特記事項なし					
臨床的意義	SARS-CoV-2 感染の診断補助					