

尿素呼気試験(IR)				7021600	
				担当部署	
コウリキシク				一般	
検査オーダー					
患者同意に関する要求事項			特記事項なし		
オーダーリング手順	1	電子カルテ→指示①→検査→*2.分野別→感染症・ウイルス→			
	2				
	3				
	4				
	5				
検査に影響する臨床情報		食事、プロトンポンプ阻害剤により偽陰性となる。 呼気採取時の息止め不足は測定不能となる。			
検査受付時間		8 : 15～16 : 00			
検体採取・搬送・保存					
患者の事前準備事項		検査 4 時間前から絶食する。 検査 1 時間前から禁煙する。 プロトンポンプ阻害剤など静菌作用を有する薬剤投与を約 2 週間前から中止する。			
検体採取の特別なタイミング		食後 4 時間以上			
検体の種類	採取管名	内容物	採取量	単位	
1 他材料	尿素呼気試験	なし		mL	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
検体搬送条件		室温			
検体受入不可基準		1) 採取容器違いの検体 2) バーコードラベルの貼られていない検体 3) 量不足 4) 薬剤投与前、投与後の検体が揃っていない場合			
保管検体の保存期間		保存不可			

検査結果・報告					
検査室の所在地		病院棟 3 階 中央検査部			
測定時間		60 分			
生物学的基準範囲		13C O2 の増加が 2.5%以上を陽性とする。 EX 一般 120 : 「ユービット錠添付文書」			
臨床判断値		該当なし			
基準値				単位	パ°-ミル
共通低値	共通高値	男性低値	男性高値	女性低値	女性高値
0	2.5	設定なし	設定なし	設定なし	設定なし
パニック値	高値	該当なし			
	低値	該当なし			
生理的変動要因		特記事項なし			
臨床的意義		ヘリコバクターピロリ菌の感染診断および除菌治療効果判定			