

|                                   |      |  |     |    |    |
|-----------------------------------|------|--|-----|----|----|
| *I <sub>17</sub> -ウイルス 21 型(NT)髄液 |      | 7066800  |     |    |    |
|                                   |      | 担当部署   |     |    |    |
| L I <sub>17</sub> -21NT           |      | 外注   |     |    |    |
| <b>検査オーダー</b>                     |      |  |     |    |    |
| 患者同意に関する要求事項                      |      | 特記事項なし   |     |    |    |
| オーダーリング手順                         | 1    | 電子カルテ→指示①→検査→*2.分野別→感染症・ウイルス→エコー→  |     |    |    |
|                                   | 2    |  |     |    |    |
|                                   | 3    |  |     |    |    |
|                                   | 4    |  |     |    |    |
|                                   | 5    |  |     |    |    |
| 検査に影響する臨床情報                       |      | 該当なし   |     |    |    |
| 検査受付時間                            |      | 8 : 15 ~ 16 : 00   |     |    |    |
| <b>検体採取・搬送・保存</b>                 |      |  |     |    |    |
| 患者の事前準備事項                         |      | 特記事項なし   |     |    |    |
| 検体採取の特別なタイミング                     |      | 急性期（発病 2～7 日）と回復期（2～3 週）の検体を同時測定し、回復期の抗体価が急性期の結果の 4 倍（39 管差）以上に上昇したとき、血清学的に有意とみなします。 |     |    |    |
| 検体の種類                             | 採取管名 | 内容物  | 採取量 | 単位 |    |
| 1                                 | 髄液   | 3 5 滅菌管  | なし  | 10 | mL |
| 2                                 | -    | -  | -   | -  | -  |
| 3                                 | -    | -  | -   | -  | -  |
| 4                                 | -    | -  | -   | -  | -  |
| 5                                 | -    | -  | -   | -  | -  |
| 6                                 | -    | -  | -   | -  | -  |
| 7                                 | -    | -  | -   | -  | -  |
| 8                                 | -    | -  | -   | -  | -  |
| 検体搬送条件                            |      | 室温   |     |    |    |
| 検体受入不可基準                          |      | 1)採取容器違いの検体<br>2)バーコードラベルの貼られていない検体<br>3)固形物   |     |    |    |
| 保管検体の保存期間                         |      | 検査委託先で 2 週間  |     |    |    |
| <b>検査結果・報告</b>                    |      |  |     |    |    |

|          |      |   |      |      |           |
|----------|------|---|------|------|-----------|
| 検査室の所在地  |      | 株式会社 BML 総合研究所<br>350-1101 川越市的場 1361-1 |      |      |           |
| 測定時間     |      | 8～14日                                   |      |      |           |
| 生物学的基準範囲 |      | 設定根拠については外注検査室に問合せ                      |      |      |           |
| 臨床判断値    |      | 設定根拠については外注検査室に問合せ                      |      |      |           |
| 基準値      |      |   |      |      | 単位        |
| 共通低値     | 共通高値 | 男性低値                                    | 男性高値 | 女性低値 | T<br>女性高値 |
| 0        | 1    |   |      |      |           |
| パニック値    | 高値   | 該当なし                                    |      |      |           |
|          | 低値   | 該当なし                                    |      |      |           |
| 生理的変動要因  |      | 該当なし                                    |      |      |           |
| 臨床的意義    |      | 外注項目の為省略                                |      |      |           |