

クロスマッチ		916100			
加スマッチ		担当部署			
加スマッチ		輸血			
<b>検査オーダー</b>					
患者同意に関する要求事項		該当なし			
オーダーリング手順	1	電子カルテ→指示②→輸血→			
	2				
	3				
	4				
	5				
検査に影響する臨床情報		1) 輸血歴・妊娠歴（不規則抗体保有・産生の可能性があるため） 2) 疾患名（特に自己免疫疾患・壊死性腸炎・重症感染症） 3) グロブリン高値 4) 使用薬剤			
検査受付時間		緊急対応(24 時間)			
<b>検体採取・搬送・保存</b>					
患者の事前準備事項		該当なし			
検体採取の特別なタイミング		該当なし			
検体の種類	採取管名	内容物	採取量	単位	
1	EDTA 血	輸血関連検査	EDTA - 2Na (顆粒)	5.5	mL
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
検体搬送条件		室温			
検体受入不可基準		① 採取容器違いの検体 ② バーコードラベルの貼られていない検体 ③ 採血後 長時間 2～8℃以外で保存された検体			
保管検体の保存期間		72 時間			

検査結果・報告					
検査室の所在地		病院棟 3 階 輸血部			
測定時間		当日中			
生物学的基準範囲					
臨床判断値					
基準値					単位
共通低値	共通高値	男性低値	男性高値	女性低値	女性高値
パニック値	高値				
	低値				
生理的変動要因		該当なし			
臨床的意義		<p>輸血前検査として受血者（患者）と供血者（輸血用血液製剤）の血液を用いて適合性を確認するための検査である。</p> <p>受血者と供血者の ABO 血液型の適合性を再確認し、受血者が供血者に対して臨床的意義のある不規則抗体を保有していないかを確認する。</p>			